


Umgang mit alkoholischen Flächen-Desinfektionsmitteln




Vorgetränkte Tücher

Für den sofortigen Einsatz verwendbar.

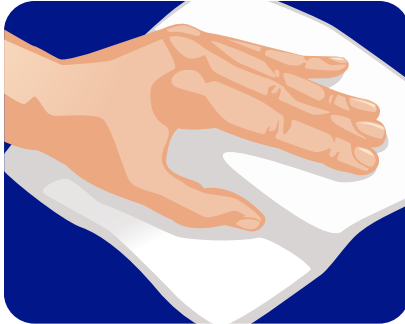

Gebrauchsfertige Lösung*

Flüssigkeit auf ein Einmaltuch geben.

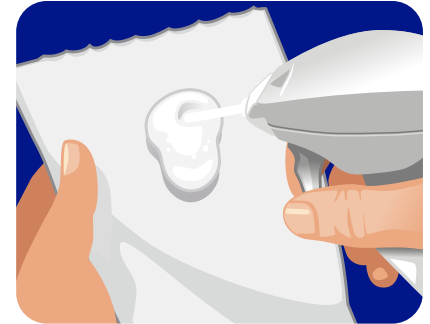

Gebrauchsfertiger Schaum

Schaum auf die Fläche oder auf ein Einmaltuch sprühen.

Anwendung

RICHTIG:

- Vor der Desinfektion sichtbaren Schmutz von Flächen entfernen
- Flächen gleichmäßig mit Flüssigkeitsfilm benetzen
- Mit gleichmäßigem Druck wischen
- Abwarten bis Flächen vollständig abgetrocknet sind
- Zündquellen ausschalten und gut lüften, da hochalkoholische Produkte leicht entzündlich sind
- Tücher nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen
- Verpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen

FALSCH:

- Desinfektionsmittel verdünnen
- Fußböden oder größere Flächen mit alkoholischen Produkten desinfizieren
- Zur Händedesinfektion verwenden
- Nebelfeuchtes Wischen reicht aus
- Die Flächen trocken wischen
- Desinfektionsmittel in den Innenraum von elektronischen Geräten gelangen lassen

Produkte

zur Schnelldesinfektion gegen Bakterien, Hefen sowie behüllte Viren, z. B. Coronaviren



Hochalkoholische Produkte

Nur auf alkoholbeständigen Flächen anwenden (z. B. kein Acryl oder Plexiglas)

Vorgetränkte Tücher:

- Bacillo® Tissues
- Bacillo® AF Tissues

Gebrauchsfertige Lösung:

- Bacillo® AF

Niedrigalkoholische Produkte

Auch auf empfindlichen Kunststoffen, Acryl- und Plexiglas sowie Monitoren, Displays, Tastaturen etc. anwendbar

Vorgetränkte Tücher:

- Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Gebrauchsfertige Lösung:

- Bacillo® 30 Sensitive Foam

* max. 50 ml pro m² Fläche entsprechend TRGS 525



Wir forschen für
den Infektionsschutz
hartmann-science-center.de

Download
Poster:



Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.